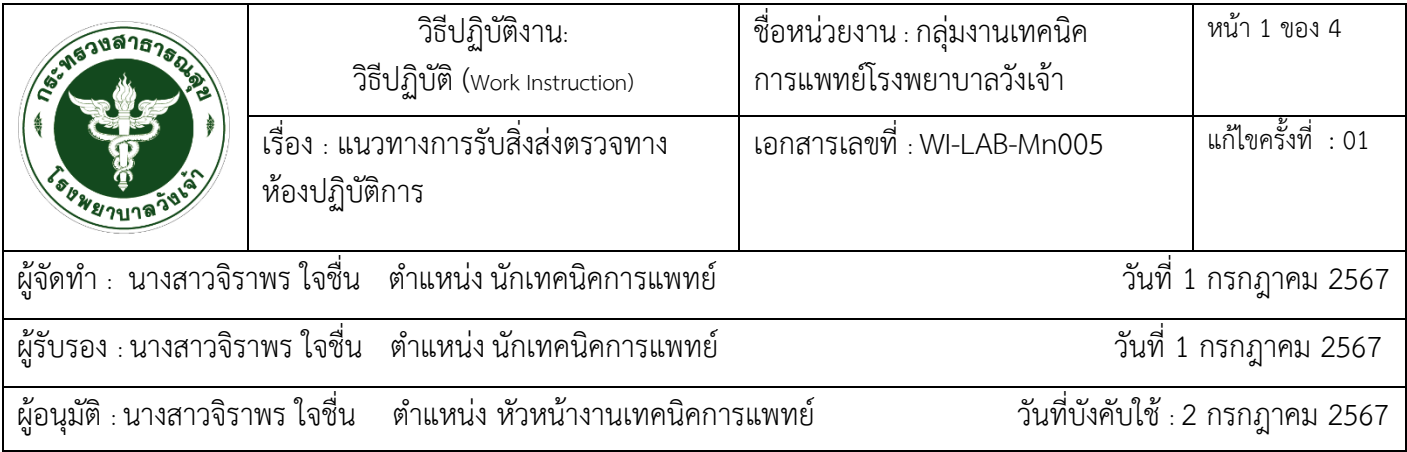


[illegible]

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 2 ของ 4
เรื่อง : : แนวทางการรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn005	แก้ไขครั้งที่ : 01
วันที่บังคับใช้ : 2 กรกฎาคม 2567		

แนวทางการรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.ความมุ่งหมาย (Purpose)

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- 1.2 เพื่อให้การรับส่งตรวจก่อนนำมาตรวจวิเคราะห์ มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ

2.การนำไปใช้ (Application)

-เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุกคน

3.เอกสารอ้างอิง (Reference)

-

4.นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

-

5.หลักการ (Principle)

-

6.เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated documents)

-แนวทางปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วย

7.ความปลอดภัย (Safety)

8.เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and Supplies)

-โปรแกรม LIS

-เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ

9.มาตรฐาน (Standard)

-

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 3 ของ 4
เรื่อง :: แนวทางการรับส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn005	แก้ไขครั้งที่ : 01
วันที่บังคับใช้ : 2 กรกฎาคม 2567		

10.วิธีดำเนินการ (Procedure)

การรับส่งตรวจ

1.การรับรายการส่งตรวจจากแผนกผู้ป่วยนอก

- 1.1 ผู้ป่วยยื่นใบนัด หรือใบส่งแลปจากแพทย์
- 1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลผู้ป่วย ตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย (WI-OPD-002) และ ความถูกต้องของรายการที่ส่งตรวจในใบส่งตรวจ กับการส่งตรวจในระบบ hos Xp
- 1.3 เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ทำการรับ แลป ปรี้นฉลากชื่อผู้ป่วย ตัดภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง หากมี ข้อมูลผิด ให้ประสานไปยังแผนกที่ส่งตรวจ ตรวจสอบแก้ไขรายการ ก่อนการลงรับแลป
- 1.4 ผู้ทำการเก็บตัวอย่างตรวจสอบชื่อผู้ป่วยกับฉลากที่ติดบนภาชนะ ก่อนการเก็บตัวอย่างทุกครั้ง
- 1.5 ก่อนการตรวจวิเคราะห์ ผู้ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างอีกครั้งก่อนการตรวจ วิเคราะห์

2.การรับรายการส่งตรวจจากแผนกผู้ป่วยใน แผนกห้องฉุกเฉิน และแผนกอื่นๆ

- 1.1 ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่นำส่งสิ่งส่งตรวจ ยื่นใบนัด, ใบส่งแลปจากแพทย์ สมุดบันทึกการส่งสิ่งส่งตรวจ พร้อมสิ่งส่งตรวจ
- 1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลผู้ป่วย ตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย (WI-OPD-002) , ความถูกต้องของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาด้วย และความถูกต้องของรายการที่ส่งตรวจในใบส่งตรวจ กับการส่งตรวจในระบบ hos Xp
- 1.3 เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ทำการรับ แลป ปรี้นฉลากชื่อผู้ป่วย ตัดภาชนะสิ่งส่งตรวจ โดยทำการติดฉลาก ชื่อของงานแลป ทับฉลากเดิม โดยการติดให้ทับเห็นชื่อของฉลากเดิมด้วย เพื่อเป็นการทวนสอบความ ถูกต้อง ของการระบุตัวผู้ป่วย หากมีข้อมูลผิด ให้ประสานไปยังแผนกที่ส่งตรวจ ตรวจสอบแก้ไขรายการ ก่อนการลงรับแลป และลงบันทึกปฏิเสธตัวอย่าง (F-LAB-01-006) กรณีสิ่งส่งตรวจไม่มีคุณภาพหรือไม่ ถูกต้อง
- 1.4 ก่อนการตรวจวิเคราะห์ ผู้ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างอีกครั้งก่อนการตรวจ วิเคราะห์

3.การรับรายการส่งตรวจแลปขอผลด่วน

- 1.1 ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่นำส่งสิ่งส่งตรวจ ยื่นใบนัด, ใบส่งแลปจากแพทย์ สมุดบันทึกการส่งสิ่งส่งตรวจ พร้อมสิ่งส่งตรวจ

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 4 ของ 4
เรื่อง :: แนวทางการรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn005	แก้ไขครั้งที่ : 01
วันที่บังคับใช้ : 2 กรกฎาคม 2567		

1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลผู้ป่วย ตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย (WI-OPD-002) , ความถูกต้องของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาด้วย และความถูกต้องของรายการที่ส่งตรวจในใบส่งตรวจ กับการส่งตรวจในระบบ hos Xp คีย์แลปด่วน

1.3 เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ทำการรับ แลป ปริ้นฉลากชื่อผู้ป่วย ติดภาชนะสิ่งส่งตรวจ โดยทำการติดฉลากชื่อของงานแลป ทับฉลากเดิม โดยการติดให้ทับเห็นชื่อของฉลากเดิมด้วย เพื่อเป็นการทวนสอบความถูกต้อง ของการระบุตัวผู้ป่วย หากมีข้อมูลผิด ให้ประสานไปยังแผนกที่ส่งตรวจ ตรวจสอบแก้ไขรายการก่อนการลงรับแลป และลงบันทึกปฏิเสธตัวอย่าง (F-LAB-01-006) กรณีสิ่งส่งตรวจไม่มีคุณภาพหรือไม่ถูกต้อง แลปขอผลด่วนแยกใส่ Rack แลปขอผลด่วน เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ก่อน

1.4 ก่อนการตรวจวิเคราะห์ ผู้ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างอีกครั้งก่อนการตรวจวิเคราะห์

11.การคำนวณ (Calculation)

-

12.การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

-

13.การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Data record and documentation)

-

14. การรายงานผล (Report of analysis)

-

15.รายละเอียดอื่น (Supplementary note)

-