

วิธีปฏิบัติ (Work instruction)

ชื่อเอกสาร แนวทางการส่งตรวจ OSCC

รหัสเอกสารWI-LAB-Mn009.....

ผู้จัดทำ..... (.....เปรมฤทัย.....หลอมทอง.....) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....	วันที่จัดทำ..... 1..กุมภาพันธ์..2569.....
ผู้ทบทวน..... (.....น.ส..จิราพร.....ใจชื่น.....) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....	วันที่ทบทวน.....1..กุมภาพันธ์..2569.....
ผู้อนุมัติ..... (.....น.ส..จิราพร.....ใจชื่น.....) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....	วันที่อนุมัติ.....2..กุมภาพันธ์..2569.....
สำเนาฉบับที่.....00.....	ผู้ถือครอง.....เทคนิคการแพทย์.....
แก้ไขครั้งที่.....00.....	วันที่เริ่มใช้.....2..กุมภาพันธ์..2569.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 3 ของ 6
เรื่อง : แนวทางการส่งตรวจ OSCC	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn009	แก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 2 กุมภาพันธ์ 2569		

1. ความมุ่งหมาย (Purpose)

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- 1.2 เพื่อให้การส่งตรวจมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ

2. การนำไปใช้ (Application)

- 2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุกคน
- 2.2 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลวังเจ้า

3. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- แนวทางการตรวจคัดความผิดปกติทางเพศ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเคมีปัสสาวะ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

4. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

-

5. หลักการ (Principle)

-

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated documents)

-

7. ความปลอดภัย (Safety)

-

8. เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and Supplies)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (HOS XP)
- โปรแกรม LoginsLAB ในระบบ LIS

9. สารมาตรฐาน (Standard)

-

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 4 ของ 6
เรื่อง : แนวทางการส่งตรวจ OSCC	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn009	แก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 2 กุมภาพันธ์ 2569		

10. วิธีดำเนินการ (Procedure)

10.1 การส่งตรวจ OSCC

10.1.2 ส่งตรวจในโปรแกรม HOSxP หน้าใบ LAB OSCC

10.1.3 กดเลือกรายการตรวจ ดังนี้ Pregnancy test, Wet smear for sperm, Acid phosphatase, Gram stain, Anti-HIV, Syphilis Rapid test, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV

The screenshot shows a web-based form titled "One Stop Crisis Center Lab OSCC". It is part of the "HOSxP" system. The form has a header with "ส่ง Lab" and "Order Lab". Below the header, there are fields for "แพทย์ผู้ส่ง" (Referring Doctor), "ครั้งที่" (Frequency), and "เลือกห้อง Lab" (Select Lab). The main body of the form is divided into three columns: "MICROS", "CLINICAL CHEMISTRY", and "SEROLOGY". Each column contains checkboxes for various tests. A red box highlights the "Vaginal Smear Gram Stain" section, which includes the "Gram stain" checkbox.

10.1.4 กรอกแบบฟอร์มแบบส่งตรวจวิเคราะห์คราบอสุจิ (F-LAB-02.I004)

10.1.5 รวบรวมเอกสารใบนำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ชันสูตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

10.2 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ OSCC

10.2.1 เจาะเลือดผู้เสียหายส่งตรวจ Anti-HIV, Syphilis Rapid test, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV โดยใช้หลอดเลือดสีแดง (Clotted Blood) จำนวน 1หลอด


10.2.2 เก็บปัสสาวะส่งตรวจ Pregnancy test

10.2.3 เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (น้ำเมือก) จากช่องคลอด หรือบริเวณอื่นจากผู้เสียหาย
วิธีการเก็บดังนี้

- แพทย์/พยาบาลจะทำการเก็บของเหลวจากในช่องคลอดและทำการป้ายเก็บบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหายจากตำแหน่งต่างๆตามที่เห็นสมควรหรือเก็บตัวอย่างจาก 3 ตำแหน่ง ได้แก่ Introitus, Posterior fornix, Cervix

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 5 ของ 6
เรื่อง : แนวทางการส่งตรวจ OSCC	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn009	แก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 2 กุมภาพันธ์ 2569		

- โดยแต่ละตำแหน่งที่เก็บจะต้องประกอบด้วย ****(เขียนระบุตำแหน่ง)****
 - กระจกกรอง 1 อัน
 - ไม้พันสำลี 1 อัน
 - ไม้พันสำลีจุ่มด้วยน้ำเกลือ (NSS) 1 อัน
 - แผ่นสไลด์ 2 แผ่น

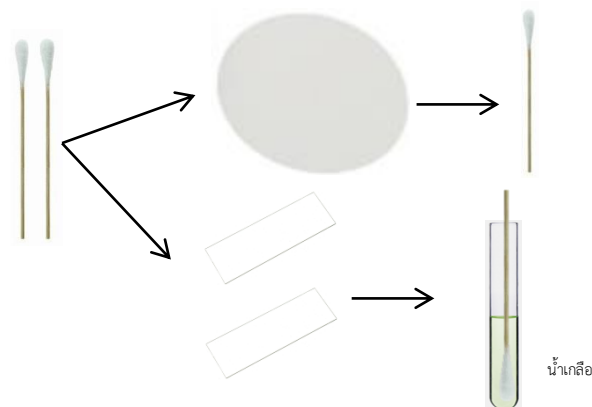

10.3 การส่งตัวอย่างส่งตรวจ OSCC

10.3.1 นำแบบส่งตรวจวิเคราะห์คราบอสุจิและใบนำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ชันสูตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ

10.3.2 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ Anti-HIV, Syphilis Rapid test, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, Pregnancy test, Gram stain, Wet smear for sperm

10.2.3 เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (น้ำเมือก) จากช่องคลอดส่งตรวจ Acid phosphatase ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

10.4 วิธีการส่งตรวจ Acid phosphatase สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

10.4.1 ห้องปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (น้ำเมือก) จากช่องคลอด ประกอบด้วย กระจกกรอง ไม้พันสำลี และแผ่นสไลด์ ของแต่ละตำแหน่ง

10.4.2 เอกสารนำส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย (สำเนาไว้ 1 ฉบับ)

1. แบบฟอร์มส่งโรงพยาบาลตำรวจ (F-LAB-01.074)
2. ใบนำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ชันสูตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3. แบบฟอร์มแบบส่งตรวจวิเคราะห์คราบอสุจิ (F-LAB-02.I004)

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 6 ของ 6
เรื่อง : แนวทางการส่งตรวจ OSCC	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-Mn009	แก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 2 กุมภาพันธ์ 2569		

10.4.3 จัดส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ ถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ก่อน 10.00 น.

10.4.3 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ จะจัดส่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางไปรษณีย์

10.5 การรับผลการตรวจ OSCC

10.5.1 เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจสอบความถูกต้อง

10.5.2 ห้องปฏิบัติการสำเนาผลการตรวจเก็บไว้ และนำผลการตรวจฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกใส่ไว้ในลิ้นชักช่องผล OSCC ลงบันทึกการรับผลตรวจ OSCC (F-LAB-01.051)

10.5.3 โทรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผลการตรวจได้ที่ลิ้นชักช่องผล OSCC ห้องปฏิบัติการ และลงลายเซ็นชื่อคนรับผลตรวจ OSCC

11.การคำนวณ (Calculation)

-

12. การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

-

13. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Data record and documentation)

- F-LAB-02.I004 แบบส่งตรวจวิเคราะห์คราบอสุจิ
- F-LAB-01.051 บันทึกการรับผลตรวจ OSCC

14. การรายงานผล (Report of analysis)

-

15. รายละเอียดอื่น (Supplementary note)

-